


Clungene-Selbsttest richtig anwenden. So geht´s:

1. Röhrcchen in die Schachtel einsetzen

Drücken Sie das Loch auf der Schachtel ein und setzen Sie das Röhrcchen in das Loch.

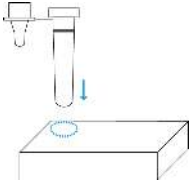

3. Tupfer öffnen

a. Öffnen Sie die Tupferverpackung am Stäbchenende.




Hinweis: Berühren Sie die Tupferspitze nicht mit den Fingern.

Tupferspitze

4. Abstrich linkes Nasenloch

a. Führen Sie die gesamte Tupferspitze vorsichtig etwa 2,5 cm in das linke Nasenloch ein.

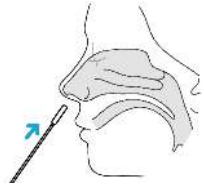


2. Extraktionsreagenz in das Röhrcchen geben


a. Drehen Sie den Verschluss des Extraktionsreagenzes ab.



b. Geben Sie das gesamte Extraktionsreagenz in das Röhrcchen.

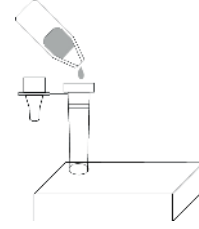

b. Entnehmen Sie den Tupfer.

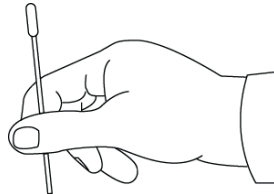


b. Streichen Sie in einer kreisförmigen Bewegung mindestens 5-mal fest gegen die Innenseiten des linken Nasenloches.




5. Abstrich rechtes Nasenloch

a. Nehmen Sie den Tupfer heraus und führen Sie ihn in das rechte Nasenloch etwa 2,5 cm hinein.

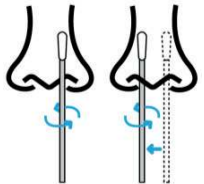


b. Streichen Sie in einer kreisförmigen Bewegung mindestens 5-mal fest gegen die Innenseiten des rechten Nasenloches.

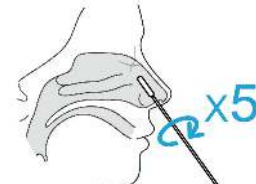

Hinweis: Wenn der Nasenabstrich nicht korrekt entnommen wird, können falsch negative Ergebnisse auftreten.


6. Tupfer in das Röhrcchen einführen

Führen Sie den Nasentupfer in das Röhrcchen mit dem Extraktionsreagenz ein.

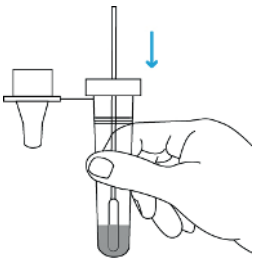

7. Tupfer 5-mal drehen

a. Drehen Sie den Tupfer mindestens 5-mal und drücken Sie dabei die Tupferspitze gegen den Boden und die Seite des Röhrcchens.

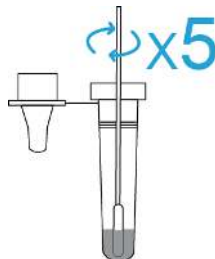


b. Lassen Sie den Tupfer 1 Minute lang im Extraktionsreagenz ruhen.




8. Tupfer entnehmen

a. Nehmen Sie den Tupfer heraus und drücken Sie dabei die Seiten des Röhrcchens zusammen, um die Flüssigkeit aus dem Tupfer zu gewinnen.

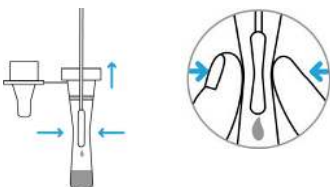


b. Verschließen Sie das Röhrcchen gut mit der dazugehörigen Tropfkappe und setzen Sie es wieder in die Schachtel.

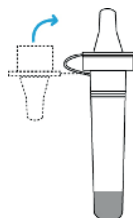

9. Testkassette öffnen

Öffnen Sie den versiegelten Beutel und nehmen Sie die Testkassette heraus.

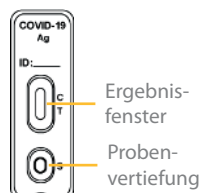

Hinweis: Die Testkassette muss während des gesamten Tests FLACH auf dem Tisch liegen.